



MONTAGEM




Tempo de Montagem - 5 minutos

Conheça **MORPHEUS** e deixe seus pacientes encantados...


Alceu Meibach

3 PARTES

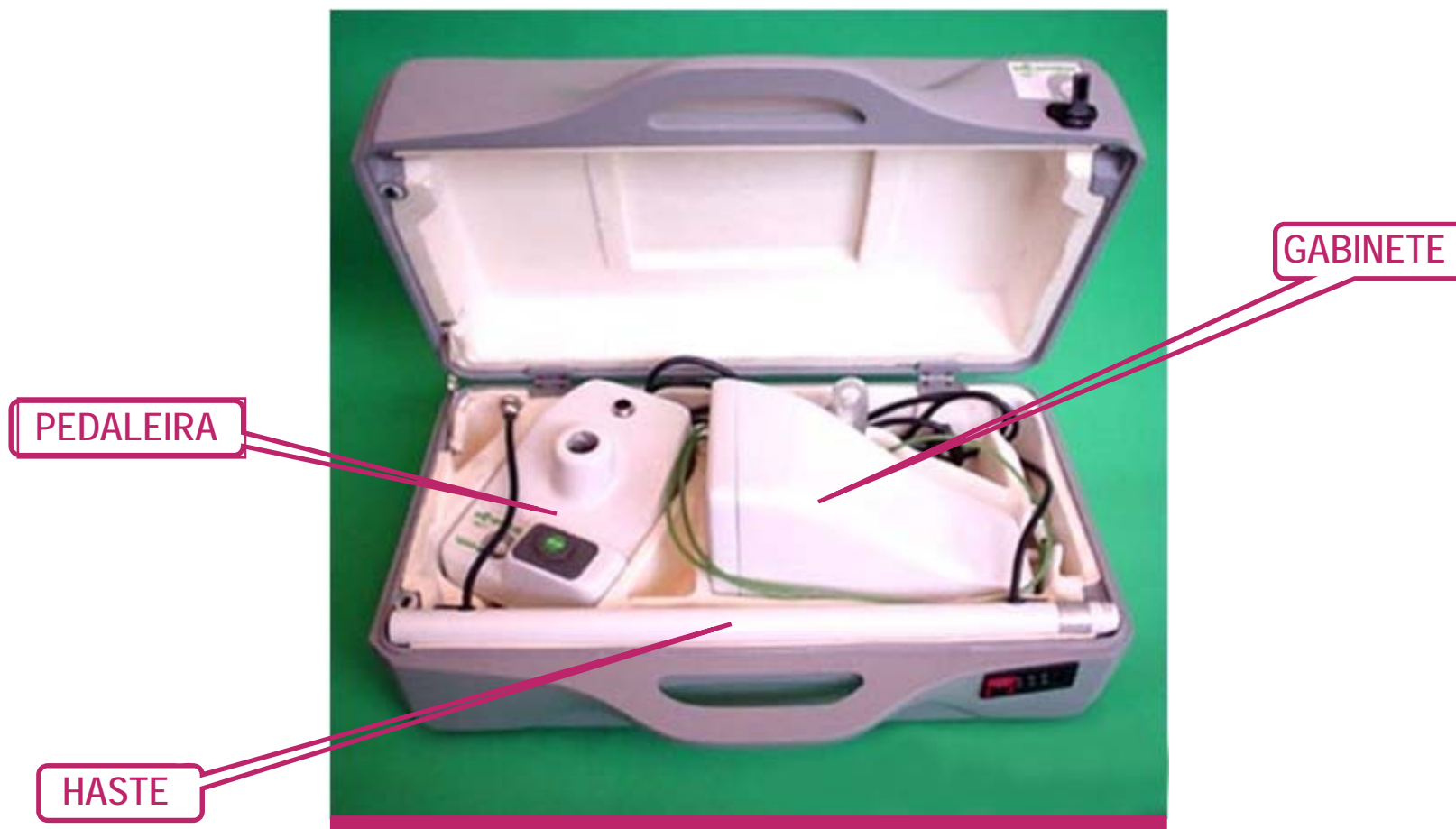

Embalagem luxo - apropriada para transportar o equipamento.
Fornecida como acessório.

1. Montagem Pedaleira

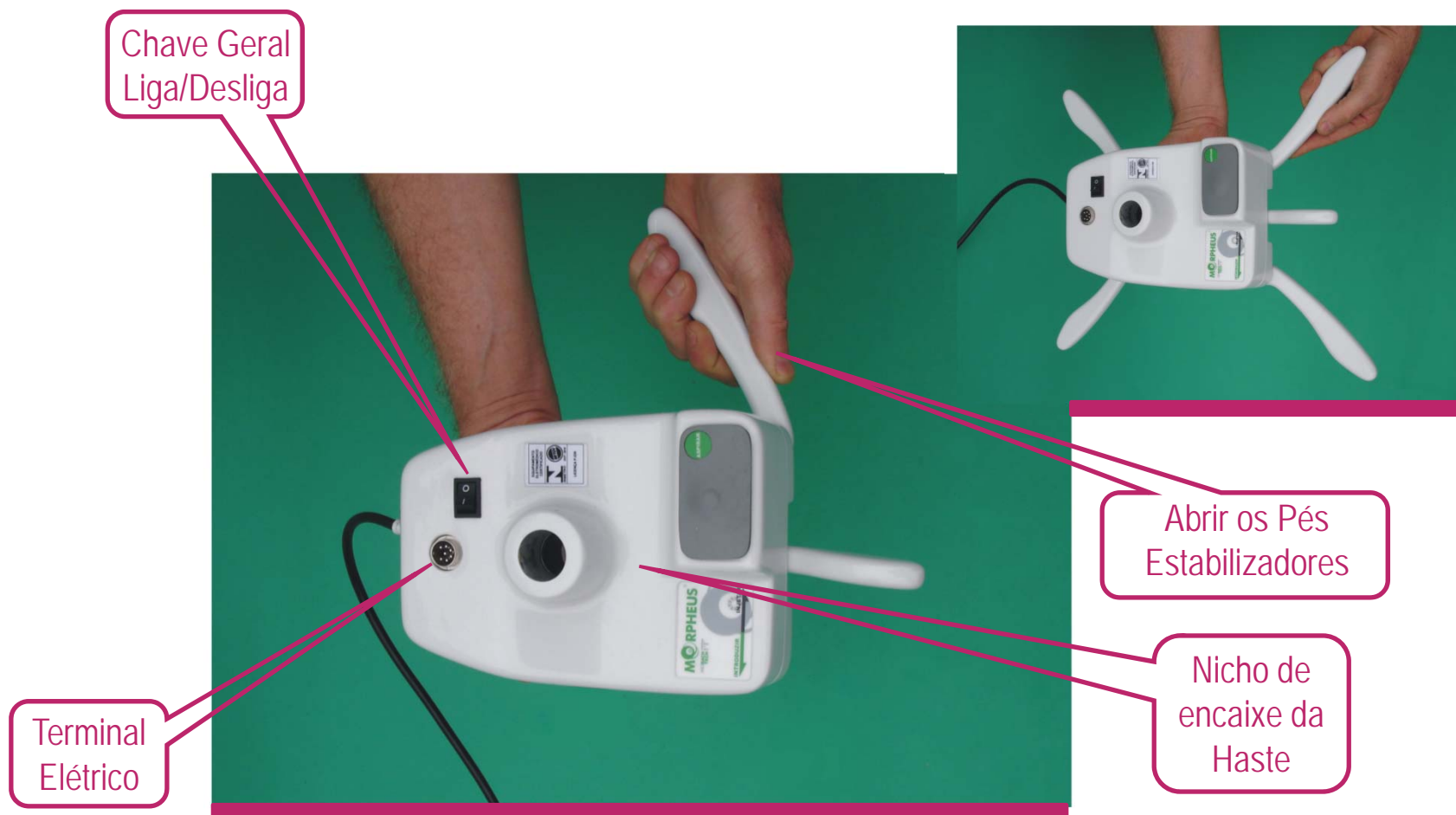


2. Montagem Haste na Pedaleira


Posicionar a haste no nicho da haste existente na Pedaleira e, com ligeira pressão, efetuar a acoplagem.

Para a perfeita ligação dos Conectores (4a e 4b) no Terminal Elétrico (Pedaleira e Gabinete) :

1. Posicionar o canal existente no Conector de forma a coincidir com o guia (ressalto) existente no Terminal Elétrico.
2. Introduzir totalmente o Conector no Terminal Elétrico.
3. Roscar a porca ("anel") do Conector na rosca do Terminal Elétrico até ajustar com firmeza.

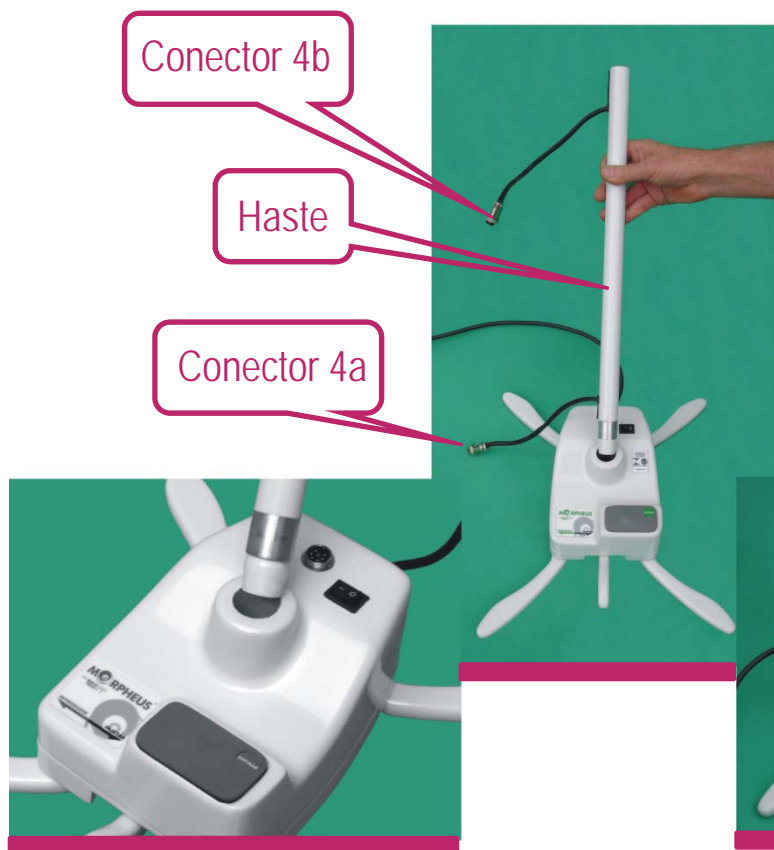

Engate rápido das partes

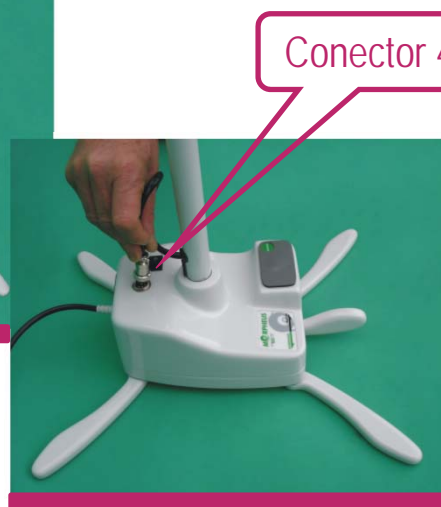


Montagem finalizada

3 - Montagem Gabinete na Haste

Conector 4b




Conector 4b

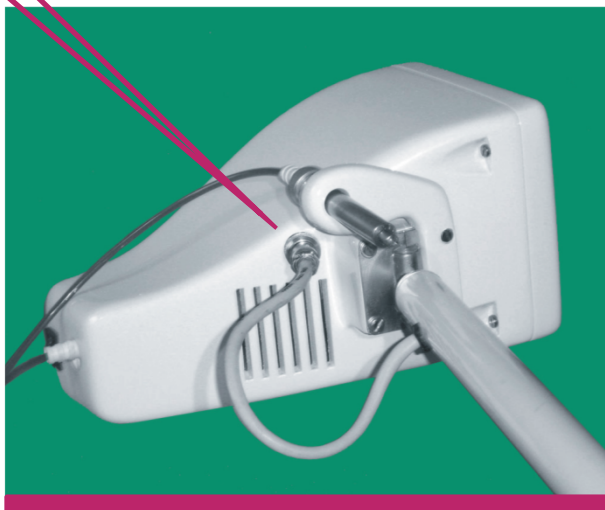

Montagem finalizada



Engate rápido das partes:
encaixar a ponta de metal
existente na base do gabinete
na parte superior da Haste

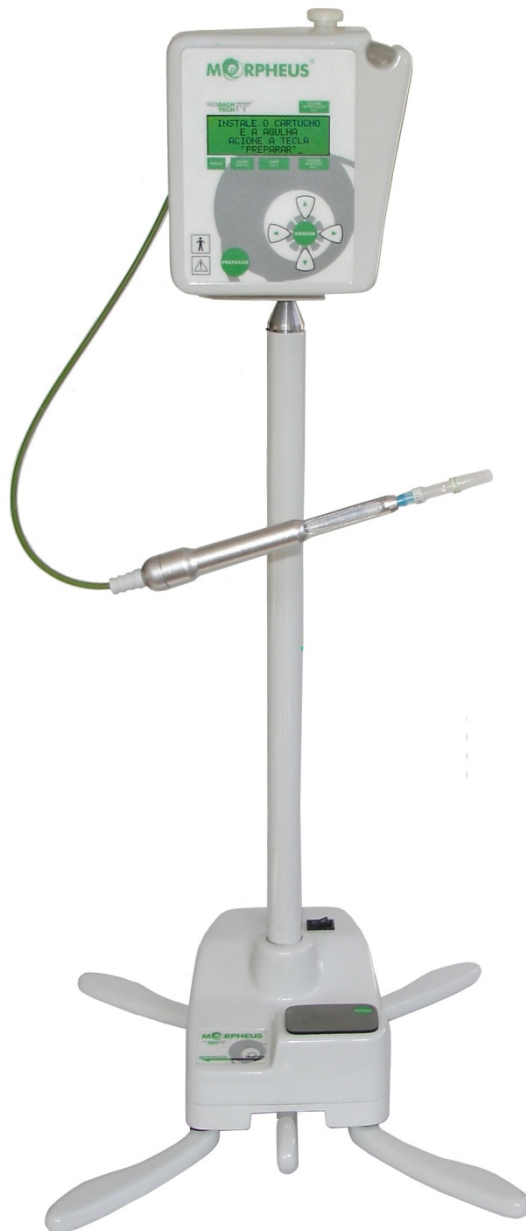

MORPHEUS[®]

Pronto para uso...

PRATICIDADE

O **MORPHEUS** foi concebido como uma unidade móvel leve e versátil para facilitar sua movimentação no consultório dentário, assim:

- Recomenda-se seu posicionamento próximo ao profissional durante os procedimentos de anestesia;
- Afastá-lo após o uso para um ponto mais distante da área de trabalho durante o tempo restante da consulta para facilitar a movimentação do profissional.

MODULAR

A rápida montagem e desmontagem das partes facilita o transporte entre diferentes locais de trabalho.