

INFILTRATIVA

Técnica Anestésica

PROGRAMADO NO **MORPHEUS** NA POSIÇÃO:

01 – INFILTRATIVA

Conheça **MORPHEUS** e deixe seus pacientes encantados...

INFILTRATIVA

LEMBRETES:

- Utilizar agulha – G 30 Curta
- Utilizar anestésico tópico
- É necessário ASPIRAÇÃO
- A TASA tem grandes vantagens sobre a Técnica Infiltrativa em todos os pontos.

TASA	INFILTRATIVA
Baixa toxicidade / DOSE = 0.6 ml	Maior toxicidade / DOSE = 1.5 ml
Maior conforto / Anestésias mais localizadas nos dentes	Maior efeito sobre os tecidos da face
Maior eficácia (reconhecidas como anestésias de melhor qualidade)	---
Sem dor	Apresenta dor / principalmente a punção inicial
Ultra rápida / O anestésico é depositado mais próximo do ápice radicular	Maior tempo para a anestesia se estabelecer

PASSO 1 – A Punção Inicial é feito na gengiva livre / Utilizar anestésico tópico.



PASSO 1 e PASSO 2

PASSO 2 – Introdução da Agulha

Para melhores resultados, o movimento da agulha deve ser lento, obedecendo a seguinte regra:

- Injetar o anestésico de forma contínua durante todo o trajeto da agulha / O pedal é acionado para a esquerda do equipamento;
- Segmentar o trajeto da introdução da agulha em pequenos trechos. Deve-se dar rápidas paradas de 3 segundos para que o anestésico acumule na frente da agulha e a latência da droga ocorra, de forma que, ao reiniciar o movimento da agulha por mais um trecho do trajeto, os tecidos por onde a agulha irá passar já estejam anestesiados. Este procedimento irá garantir que toda a introdução da agulha seja realizada de forma totalmente indolor.

Lembrete: O anestésico deve estar em sua qualidade total, o que irá garantir a rápida latência da droga durante os 3 segundos que a agulha fica parada.



PASSO 3 – Injeção

